

30
JAHRE
THERALINE

Wir geben Leben Halt
SEIT 1993

THERALINE

Wir geben Leben Halt

my?

GEBRAUCHSANLEITUNG
UND PRODUKTINFORMATIONEN



The background of the page is a soft-focus photograph of a baby being held in a woman's arms. The baby is lying down, and the woman's hands are visible, gently supporting the baby. The overall tone is warm and intimate. In the lower-left quadrant, there is a graphic illustration of a white pearl resting inside a grey, shell-like structure. The shell is filled with small white beads, and the pearl is the largest one, positioned in the center. The shell has a wavy, organic shape.

Wir geben Leben Halt

Wenn Sie unsere Perlenkissen einmal ausprobieren, spüren Sie eines sofort: sie geben Ihnen oder Ihren Lieben Halt, wie kein anderes Kissen. Dabei kommen unsere kleinen Theraline-„Helden“ ganz groß raus: unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen.

Egal ob groß oder klein, schwanger oder stillend oder ob Sie unsere Kissen einfach nur zum Schlafen nehmen, die Theraline-Kissen formen sich dank der frei fließenden, schadstofffreien Perlen immer optimal an und geben im Leben Halt – genauso, wie Sie es brauchen.



DIE THERALINE WOHLFÜHLGARANTIE

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schön und aufregend die Zeit der Schwangerschaft und die ersten Monate mit einem Baby sind. Wie wichtig manchmal Kleinigkeiten sind und dass am Ende immer das große Ganze zählt.

Seit nunmehr 30 Jahren geben wir unser Bestes, um jedes Jahr eine neue Generation von Müttern von uns und unseren Produkten zu überzeugen. Herausragende Stillkissenvielfalt, dazu ein vollkommen atemdurchlässiges Babykopfkissen, Kinderkopfkissen sowie Stilleinlagen aus Silikon, machen unser Programm unverwechselbar und spannend.

Ihre Sicherheit und lange Freude an der Nutzung sind für uns wirklich wichtig. An den vielen einzigartigen Produktdetails wird dies offensichtlich, aber manchmal machen auch fast unsichtbare Kleinigkeiten den Unterschied. Ganz egal ob im guten Fachgeschäft, Katalog oder Online: Von der Marke Theraline finden Sie immer ein ausgereiftes und sinnvolles Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Wenn dennoch einmal etwas schiefgeht, egal ob bei der Lieferung oder selbst nach Jahren am Produkt, können Sie auf unsere großzügige Wohlfühlgarantie und beste Beratung zählen.

Werden Sie mit uns zusammen Ihr eigener Spezialist für ausgewählte Stoffqualitäten und Kissenfüllstoffe, für Formen und Funktionen, für Schadstofffreiheit und Sicherheit im Babybett.

Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Freude beim Informieren und Auswählen!

Ihr Theraline Team

GESUNDE & SICHERE PRODUKTE

Darauf können Sie sich verlassen: Die Schadstofffreiheit aller verwendeten Füll- und Bezugsstoffe und eine hundertprozentige Produktsicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. Die Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen mit Perlenfüllung trugen deshalb seit 1998 das Toxproof®-Label des TÜV Rheinland. Seit Ende Juli 2021 wird nun das TÜV Rheinland Prüfsiegel durch das OEKO-TEX STANDARD 100-Siegel des Hohenstein Instituts ersetzt. Das bekannte Siegel gibt Ihnen die Sicherheit, ein garantiert gesundheitsverträgliches Produkt aus unserem Baby- oder Bettensortiment zu erwerben.



Sehr erfreulich ist auch, dass unser Original Theraline Stillkissen in fuchsia-cappuccino auch in 2016 und 2018 (in der Rubrik "Nebenwirkungen") vom Magazin Ökotest mit „sehr gut“ bewertet wurde.

FREUDE AM SCHÖNEN

Egal, ob besonders farbechter Feinköper, kuscheliger Jersey oder nachhaltige Bambus-Viskose: Alle Theraline-Stoffe sind hochwertig und fühlen sich richtig gut an. Denn sie werden aus außergewöhnlich weicher Baumwolle oder Bambusfaser gefertigt. Mercerisierung und besonders farbechte Drucke verleihen einen feinen Glanz. Dank langjähriger Erfahrung stimmt auch die Verarbeitung bis ins kleinste Detail.

GEBRAUCHSANLEITUNG

INDIVIDUELLE ANPASSUNG DER FÜLLHÖHE

Mit der my7 haben Sie ein Seitenschläferkissen höchster Qualität erworben. Feine Stoffe, ein intelligenter Schnitt und speziell ausgewählte Füllstoffe machen die my7 zum perfekten Schlafbegleiter. Guter Schlaf wird gefördert, der Rücken entlastet und die Erholung optimiert.

Schlaf ist ein sensibler und äußerst persönlicher Bereich unseres täglichen Lebens. Die individuelle Liegeposition ist hierbei stets bedeutend.

Damit auch Sie Ihre ideale Schlafposition erreichen können, verfügt die my7 über 2 verschiedene Nachfüllöffnungen zur Füllstoffentnahme oder auch -zufuhr.

Am äußeren Ende des Kopfteils finden Sie deshalb einen Reißverschluss im Kisseninlett. Durch Öffnen gelangen Sie an den Thera-RHOMB®-Füllstoff des „Kopfkissens“. Die zweite Öffnung (eine selbstabdichtende Tunnelöffnung*) ist am unteren Ende des langen Kissenkörpers eingelassen. Hierüber lassen sich unsere sandfeinen EPS-Mikroperlen erreichen.

Ob Sie nun eine Anpassung der Füllhöhe benötigen, wird ein erstes Testliegen bzw. die erste Nacht mit der my7 zeigen. Liegt dann z. B. Ihr Kopf für Ihr Empfinden zu hoch, empfiehlt sich eine gezielte Entnahme des Thera-RHOMB®-

Füllstoffs bis auf die individuell richtige Höhe/Auflage.

So geht's:

Kopfteil:

Bezug abnehmen, Reißverschluss am Kopfteil öffnen, Füllung entnehmen und ganz wichtig, den Reißverschluss wieder sorgfältig verschließen! (Bewahren Sie die entnommenen Füllung für eine spätere Neubefüllung auf.)

Beinauflage:

Hierzu haben wir in das Kisseninlett eine selbstabdichtende Tunnelöffnung eingebracht. Diese befindet sich im unteren Drittel der Außennaht (siehe nebenstehende Abbildung). Rollen Sie nun ein beliebiges DIN A4 Blatt zu einem festen Röhrchen zusammen (Ø 1,5 cm) und führen Sie es dann von oben ca. 14 cm weit in die Tunnelöffnung ein. Wenn Sie nun das Kissen mit der Öffnung nach unten drehen, fließen die Perlen durch das Röhrchen und können in einem Beutel aufgefangen werden. Entnehmen Sie einfach so viel, bis Sie den für sich gewünschten Füllgrad erreicht haben. Natürlich können Sie das Kissen auf diese Weise auch wieder befüllen.


Tipp: Am besten machen Sie dies draußen oder halten einen Staubsauger bereit, um evtl. ausgetretene Mikroperlen aufzusaugen.

Mit wenigen Handgriffen haben Sie die für sich optimale Liegeposition erreicht.

NACHFÜLLPACKUNGEN / GEWÄHRLEISTUNGS-AUSCHLUSS

Bedingt durch die Eigenschaften von Baumwollgewebe und Polystyrol ist - in Abhängigkeit von Art und Dauer der Beanspruchung - ein Volumenschwund normal. Ist von Ihnen ein höherer Füllgrad erwünscht, können Sie im Fachhandel oder direkt bei uns unter www.shop.theraline.de eine Nachfüllpackung inkl. Füllstutzen erwerben. Einen Anspruch auf kostenlosen Erhalt von Nachfüllmaterial müssen wir leider ausschließen.

Selbstabdichtende Tunnelöffnung zur Entnahme oder Nachfüllung von Perlen im Beinbereich:

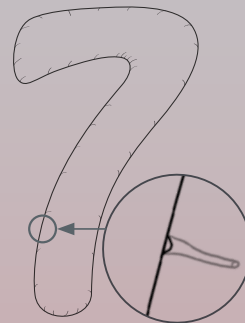

WASCHBARKEIT

Die my7 ist bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet. Bitte beachten Sie hierzu das angebrachte Etikett. Bitte waschen Sie das Inlett nun in einem hinreichend dichten Wäschesack (kein Netz!), da so bei einem evtl. Defekt ein Austreten der Füllstoffe vermieden wird. Zudem sollte das Inlett vor der Wäsche sorgfältig auf „Undichtigkeiten“ bzw. Nahtfehler kontrolliert werden.

Wer keinen ausreichend großen Wäschesack zur Hand hat, kann auch den Außenbezug hierfür benutzen. Bei neuen Bezügen und kräftigen Farben kann es während der Wäsche zu einem leichten Farbübergang auf das Inlett kommen, der die Nutzbarkeit aber nicht einschränkt.

Achtung:

Waschmaschinen- und Wäschetrocknerbenutzung (nur auf kleinster Stufe) nur mit ausreichend Bewegungsraum für das Inlettkissen. Das Kissen muss sich in der Waschmaschine und im Trockner frei bewegen können. Nehmen Sie ggf. ausreichend Füllung heraus (siehe „Individuelle Anpassung der Füllhöhe“). Außenbezüge auf links gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen. Nicht zusammen mit andersfarbiger Wäsche waschen oder trocknen.

Tipp:

In üblichen Haushaltswaschmaschinen und Trocknern hat die my7 nur dann den notwendigen Bewegungsspielraum, wenn vorher ausreichend Füllung entnommen wurde. Oft empfiehlt es sich deshalb, von der örtlichen Reinigung ein Angebot einzuholen.

TROCKNEN OHNE WÄSCHETROCKNER

Alternativ und kostengünstig kann man die my7 auch z.B. auf der Heizung oder an einem sonnigen Tag auf der Wäscheleine trocknen. Wichtig! Zwischendurch immer wieder aufschütteln und wirklich vollständig trocknen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Für Schäden durch ausgelaufenes Füllmaterial, die auf Waschen ohne hinreichend dichten Wäschesack (kein Netz!) oder zu wenig Bewegungsfreiraum während des Wasch- oder Trocknungsvorganges zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

BEZIEHEN DER MY7

Um bei einem Wechsel des Außenbezugs das Kissen wieder schnell und ohne viel Aufwand zu beziehen, empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

1. Halten Sie am oberen Ende (Kopfteil) des Inletts eine 15–20 cm „Nase“ nach oben.



2. Drücken Sie diese „Nase“ nun ganz ans Ende des Außenbezugs (Kopfteil).



Das „Kopfkissen“ der my7 ist nun bereits im Außenbezug eingebracht. Als nächstes drehen Sie das Kissen und halten den Innenbezug von außen mit einer Hand fest. Die EPS-Mikroperlen-Füllung des Beinteils fließt nun Richtung Kopfteil. Sobald dies passiert ist, greifen Sie sich auch hier, am regulär unteren Ende des Kissens, eine neue Nase und schieben das Kissen erneut bis ganz ans Ende in den Außenbezug. Jetzt müssen Sie nur noch die Füllung wieder gleichmäßig in beiden Kissenenden verteilen und können dann den Reißverschluss schließen.

THERALINE

my7

SCHWANGERSCHAFTS-, STILL- & SEITENSCHLÄFERKISSEN

EXTRA GROSSE, VORGEFORMTE AUFLAGE ZUM STILLEN & KUSCHELN

- Mit integriertem Kopfkissen und kuscheligem Flauschbezug
- Bequeme Seitenlage mit Babybauch
- Entspanntes Stillen
- Ideal auch für größere Babys oder Zwillinge
- Geruchs- & schadstofffrei
- Bezüge aus 100 % Baumwolle oder Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle




MIT BAUCH UND BABY WIE AUF WOLKE 7

Auf diesem Kissen könnte man glatt sieben Wochen durchschlafen, so bequem ist es. Ursprünglich wurde das my7 nämlich als Seitenschläferkissen konzipiert: Die innovative Sieben-Form bietet ein stützendes, integriertes Kopfkissen und eine weiche, gleichzeitig stabile Auflage für Arme und Beine. Weil das my7 herrlich groß und qualitativ besonders hochwertig ist, nutzen es viele Frauen mit zunehmender Begeisterung als Still- und Schwangerschaftskissen. Zum Stillen wird das Seitenteil des Kissens rückwärtig um den Körper gelegt, sodass Baby ganz bequem auf dem Kopfteil des my7 Platz findet. Kein anderes Stillkissen bietet eine so große Liegefläche für das trinkende oder kuschelnde Baby. Da das Kissen dank seiner komfortablen Größe außerdem nicht verrutscht, kann Mama beim Stillen eine ganz entspannte Körperhaltung einnehmen. Damit kann das my7 Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich vorbeugen.

In der Schwangerschaft ist das my7 ein angenehm stützendes Schlafkissen. Mit seiner Zwei-Zonen-Füllung entlastet es Nacken und Schulterpartie, während es gleichzeitig als perfekte Stütze für Babybauch und Beine dient.



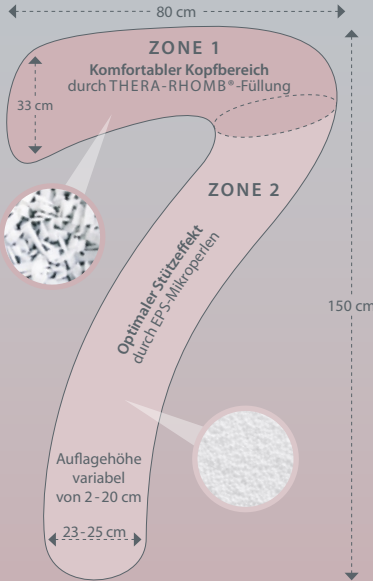

ZAUBERHAFT WEICH, GENIAL GEMACHT



MIKROPERLEN, THERA-RHOMB® & WATTIERUNG

Für die my7 nutzen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Stillkissen und verbinden die Stärken von drei unterschiedlichen Füllmaterialien zu einem neuen einmaligen Schlafkomfort in der anatomisch vorteilhaften Siebenform. Es gibt viele Schlaf- und Stillkissen, die weich und anschmiegsam sind, doch häufig sind sie viel zu weich und schwach gefüllt. Dadurch werden Beine und Knie meist schon nach kurzer Zeit nicht mehr ausreichend gestützt - der Körper verliert die Balance. Kissen mit Füllungen aus Naturspelzen oder Polystyrolperlen sind zwar sehr stabil, rascheln aber für die meisten müden Geister viel zu stark und sind zum Schlafen recht hart. Dank eines einzigartigen Kissenbaus gelingt es my7 genau diese Schwachstellen zu vermeiden.

PRODUKTINFORMATION

- Material**
Kissenhülle: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan -
Wattierung: 100 % Polyester (Gesamtbezug: 65 % Polyester, 20 % Viskose aus Bambusfasern, 13 % Baumwolle (Bio) / 2 % Elasthan)
oder:
Kissenhülle: 100 % Baumwolle,
Wattierung: 100 % Polyester (Gesamtbezug 65 % Polyester und 35 % Baumwolle)
Inlett: 100 % Baumwolle
Füllung: Mikroperlen: Polystyrol (ca. 35g/l)
Thera-RHOMB®: 51 % Polyurethan / 49 % Polypropylen
- Pflege**
60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trockengeeignet
- Waschhinweise Bezug

- Waschhinweise Inlett


THERALINE

Yinnie


BAUCHSTÜTZ- & STILLKISSEN

STILLEN SMART & EASY

- Handliche Form
- Flexibler Halt durch feinste Mikroperlenfüllung
- Original Theraline Qualität
- Geprüfte Schadstofffreiheit
- Samtweiche, hochwertige Feinkörperbezüge

Yinnie, das ist unbeschwertes Stillen pur in Anlehnung an die harmonische Energie von Yin und Yang. Dafür sorgt nicht nur die charakteristische Yin-Form mit super bequemer Liegefläche fürs Baby. Seine besondere Festigkeit und Formstabilität machen Yinnie so besonders: Der dichte Füllgrad mit den Original Theraline Mikroperlen lässt praktisch nichts verrutschen und gibt dem Säugling beim Stillen auf Mamas Schoß zuverlässigen Halt.

PRODUKTINFORMATION

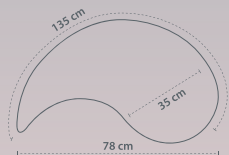

Material

Bezug & Inlett: 100 % Baumwolle

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege

Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet



Weitere schöne Dessins auf shop.theraline.de




Der Plüschmond

KUSCHEL- & STILLKISSEN

ZUM TRÄUMEN SCHÖN

- Bequemes Kopf- & Nackenkissen
- Kuscheliges Schmuse- & Lesekissen
- Handliches Bauchstütz- & Stillkissen
- Samtiger Frotteeplüsch & seidiger Stretch
- Feinste Mikroperlenfüllung
- Geruchs- & schadstofffrei

PRODUKTINFORMATION

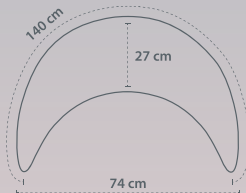

Material
Stretchstoff (90 % Nylon, 10 % Elasthan)
und Plüsch (85 % Polyester, 15 % Polyamid)
Füllung: Polystyrol (Mikroperlen,
ca. 18 Liter, 25 g/l)

Besonderheiten
Frotteeplüsch-Elasthan-Kombi,
mit Nachfüllöffnung

Pflege
40 °C Schonwaschgang im geschlossenen
Wäschesack, trocknergeeignet

Neu!

Der Bambusmond

MIT ABNEHMBAREM BEZUG AUS
BAMBUS-VISKOSE MIT BIO-BAUMWOLLE

PRODUKTINFORMATION

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle

Inlett darf nicht ohne Außenbezug verwendet werden!

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege

40/60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet



MÄRCHENHAFT ANSCHMIEGSAM & VIELSEITIG

Ob als bequemes Kopf- & Nackenkissen oder einfach zum Reinkuscheln beim Lesen oder Fernsehen auf dem Sofa: Der Theraline Plüschmond bereitet Ihnen entspannte Wohlfühlmomente. Und natürlich ist der Plüschmond auch ein Garant für entspanntes Stillen zwischendurch oder unterwegs.

Dank der genialen Mondform liegt Ihr Kopf einfach immer richtig – ganz egal, ob für kurze Momente der Entspannung oder für einen erholsamen Schlaf.



THERALINE

DAS THERALINE **BABYKOPFKISSEN**

Das Baby- kopfkissen

PRÄVENTION & REGENERATION
– MIT SICHERHEIT

SCHÜTZEN SIE IHR BABY RECHTZEITIG

Ärzte empfehlen aus gutem Grund, Babys auf dem Rücken zu betten. Das Köpfchen Ihres Babys ist direkt nach der Geburt besonders weich und damit anfälliger für Kopfverformungen. Woche für Woche wird das Köpfchen dann kontinuierlich stabiler. Nach 4-5 Monaten stellt sich deshalb nur noch in einzelnen Fällen eine Kopfverformung ganz neu ein. Unglücklicherweise verhärten sich in dieser Zeit aber auch bereits entstandene Verformungen und es kann einige Zeit dauern, bis diese sich verwachsen.

PRODUKTINFORMATION

Maße

Größe 1: ca. 21 cm x 20 cm,
ca. 3 cm hoch
Größe 2: ca. 24,5 cm x 23 cm,
ca. 5 cm hoch

Material

96 % Polyester / 4 % Baumwolle

Pflege

waschbar bis 60 °C



ERGONOMISCH & BEQUEM

Das ergonomisch geformte High-Tech Abstandsgewebe unserer Theraline Babykopfkissen sorgt für effektive Unterstützung und ist bei maximaler Sicherheit ausgesprochen bequem für Ihr Baby. Das Oberflächengewebe ist besonders hautfreundlich und angenehm. Ihr Baby wird es genießen!

Größe 1 (bis ca. 7 kg)

PRÄVENTION & SICHERHEIT*

- Hilft, Verformungen zu verhindern
- Unterstützt deren schnellere Rückbildung
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Ergonomische und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch



FREIE LUFTZIRKULATION
DURCH 3D-ABSTANDSGEWEBE

* Leider ist die Verwendung des Theraline Babykopfkissens allein nicht immer ausreichend wirksam. Bei allen Kopfverformungen sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen sowie weitere von ihm empfohlene Maßnahmen ergreifen.

GANZ SICHER

So frei atemdurchlässig ist nur ein Kissen aus 100 % Abstandsgewebe: Sollte sich Ihr Baby beginnen zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde geraten, kann es trotzdem weiter frei atmen. Dies bietet so kein anderes Kissen.



Größe 2 (ab ca. 7 kg)

REGENERATION & SICHERHEIT*

- Unterstützt die Rückbildung von Verformungen
- Hilft, eine Verschlimmerung zu verhindern
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Leicht stabilisierende, ergonomische Form für eine heilungsfördernde und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch

Mamma Pads

DIE CLEVERE STILLEINLAGE

MEHR FREUDE AM STILLLEN

- Verhindert durch sanften Druck das Auslaufen der Muttermilch
- Nicht absorbierend
- Atmungsaktiv und hautfreundlich
- Sparsam, für ca. 150-200 Anwendungen*
- Angenehmer Tragekomfort
- Ohne BH schlafen und ausgehen
- Nicht sichtbar z. B. unter T-Shirt, Abendkleid oder Badeanzug

PRODUKTINFORMATION

Maße

ø ca. 9 cm, Stärke ca. 2,7 mm

Material

ultrareines, medizinisches Silikon

Besonderheiten

schadstofffrei, atmungsaktiv, hauchdünne Haftschrift

Pflege

abwaschbar, kochbar

NUTZT EINEN NATÜRLICHEN KÖRPERREFLEX

Die Mamma Pads sind atmungsaktive Stilleinlagen aus hautfreundlichem Silikon, die einen natürlichen Körperreflex nutzen: Durch fast unmerklichen Druck auf die Brustwarzen verhindern sie zuverlässig das Auslaufen wertvoller Muttermilch in den Stillpausen. Ab jetzt bekommt Ihr Baby die ganze, gute Milch. Und Sie dürfen sich freuen, dass Bluse oder T-Shirt trocken und fleckenfrei bleiben.

NEUE FREIHEITEN GENIEßEN

Weil die Mamma Pads keine Feuchtigkeit absorbieren müssen wie klassische Stilleinlagen, sind sie wirklich hauchdünn. Das macht sie nahezu unsichtbar, selbst bei körperbetonter Kleidung oder transparenten Dessous. Eine echte Befreiung: Mit den Theraline Mamma Pads können Sie nachts wieder ohne BH schlafen – und das ganz sicher.

Super praktisch: Einmal angelegt, haften die Mamma Pads zuverlässig ohne Verrutschen – prima beim Joggen mit der Freundin oder beim Babyschwimmen.

Querschnitt durch einen Mamma Pad

Mamma Pad
Stärke: ca. 2,7 mm

Haftschrift
Stärke: > 0,1 mm



THERALINE

Das Nacken- kissen


SCHLAF- & AUTONACKENKISSEN

ENTSPANNUNG FÜR GROSS & KLEIN

- Perfekt als Reiseschlafkissen
- Hält Ihr Baby in Seiten- oder Rückenlage stabil
- Abnehmbarer Bezug
- Sandfeine, anschmiegsame Mikroperlenfüllung
- Geruchs- & schadstofffrei

Nackenkissen von Theraline sind eine ideale Kombination aus Reise- und Schlafkissen, gefüllt mit feinsten Mikroperlen für gefahrlose Anwendung im Auto. Es gibt sie in vielen verschiedenen Varianten für Groß und Klein und von einfach & funktional bis zur kuscheligen Schäfchenausführung.

PRODUKTINFORMATION

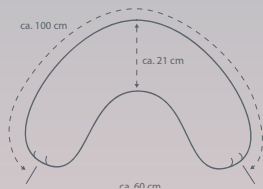

Material
Bezug: 100 % Baumwolle **oder**
57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle

Füllung: Polystyrol
(Mikroperlen, ca. 25 g/l)

Pflege

60 °C Schonwaschgang
im geschlossenen Wäschesack,
trocknergeeignet

♥
In vielen
unterschiedlichen
Formen und Farben auf
shop.thermaline.de



Kirschkernkissen

IMMER DIE PERFEKTE TEMPERATUR

- Sanfte Wärme und Kühlung
- Mikrowellengeeignet
- Lange Temperaturspeicherung
- Für Klein und Groß



DIE KERNIGEN HELFERLEIN

Schon vor mehr als 100 Jahren war dieses kernige Helferlein ein beliebtes Hausmittel. In der Schwangerschaft unterstützt eine wohlthuende trockene Wärme die Entspannung des oft sehr belasteten unteren Rückens und Steißbeins. Kirschkernkissen werden einfach für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmt und schon hält die Wärme für lange Zeit. Doch auch, wenn später Babys Bauch unter Schmerzen leidet, werden Kirschkernkissen als „Geheimtipp“ gehandelt. Aber der Nutzen geht noch weiter: Zum Beispiel beim Zahnen können Kirschkernkissen durch Kühlung lindern.

Baby-Tröste-Tiere

OH, WIE SCHÖN RASCHELT UND KNIRSCHT DENN DAS?

Die lustigen Baby-Tröste-Tiere von Theraline sind mit mehrfach gereinigten Kirschkernen zur sanften Erwärmung oder Kühlung gefüllt, wenn das Bäuchlein mal drückt oder der böse Zahn nicht aufhören will, weh zu tun. Ideal für den kleinen Heilzauber zwischendurch, für Babys und bis weit ins Kleinkindalter hinein. Toll für Medizinfrauen: Es lässt sich in Sekunden ganz leicht erwärmen!



THERALINE

DAS THERALINE KINDERKOPFKISSEN

Das Kinder-
kopfkissen

Neu!

SCHLAF- & NACKENSTÜTZKISSEN


GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- Stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- Bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- Flexibel für Rücken- und Seitenlage
- Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle
- Ab ca. 2 - 7 Jahre

SCHÖN GETRÄUMT & FRÖHLICH AUFGEWACHT

Gerade unsere Kleinen müssen ausreichend und gesund schlafen, damit sie den Herausforderungen des Lebens ausgeruht und fröhlich begegnen können. Daher ist es für unsere Kinder besonders wichtig, auf einem ergonomisch geeigneten Kopfkissen zu schlafen.

Wir bei Theraline haben es uns daher mit unserer über 30 Jahre langen Erfahrung im Stillkissen- und Babykopfkissen-Bereich zur Aufgabe gemacht, ein Kinderkopfkissen zu entwickeln, das unseren Kleinen bequemen Halt gibt, damit sie gut & gesund schlafen und fröhlich & erholt aufwachen.

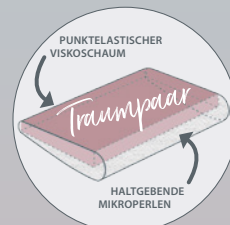

PERFEKTE SYMBOSE

- Hunderttausende feine Mikroperlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punkt-elastischem Viskoschaum nimmt den Kinderkopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch lässt den untenliegenden Mikroperlen genügend Raum, um sich flexibel in die optimale Position zu bewegen.

PRODUKTINFORMATION

Größe

ca. 50 x 32 cm, ca. 7 cm hoch

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 80 g/l)

Schaumstoffkern (Polyurethan)

Pflege

60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet, Schaumstoffkern vor dem Waschen herausnehmen



Das Kopfkissen

Neu!

SCHLAF- & NACKENSTÜTZKISSEN

DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN KOPFKISSEN HAT EIN ENDE

Haben Sie auch schon diverse Kissen ausprobiert und immer noch nicht das richtige gefunden? Oft ist es eine wahre Odyssee, das perfekte Kopfkissen zu finden. Das eine Kissen ist zu weich - das andere zu fest. Weder Feder- noch Polyester- oder Polyurethanfüllungen waren die Lösung. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein Kopfkissen zu entwickeln, das Ihnen den bequemen Halt gibt, damit Sie gut und gesund schlafen und frisch und erholt aufwachen.

Die Lösung liegt im perfekten Zusammenspiel von 3 Komponenten:

- Hunderttausende feine Mikroperlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punktelastischem Viskoschaum nimmt Ihren Kopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch lässt den untenliegenden Mikroperlen genügend Raum, um sich flexibel in die für Sie angenehme Richtung zu bewegen.

GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- ist flexibel für Rücken- und Seitenlage
- hat einen Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle

AUS UNSERER BETTENWELT:
GESUNDER HALT - IMMER AUF DER RICHTIGEN HÖHE



PRODUKTINFORMATION

Größe
ca. 50 x 32 cm, ca. 12 cm hoch

Material
Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan
Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 80 g/l)
Schaumstoffkern (Polyurethan)

Pflege
60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet, Schaumstoffkern vor dem Waschen herausnehmen

THERALINE

Wir geben Leben Halt

THERALINE eK · Industriepark Nord 56 · 53567 Buchholz Ww.

HRA 21073 - AG Montabaur

Mail: info@theraline.de

Tel.: +49(0)2683-96 96 0 · Fax: +49(0)2683-96 96 78



www.theraline.de